



〈ファイコンプレミアムシリーズ〉は高品質で付加価値のある製品で、  
もっとも大切な「安心」を提供します。

【使用上の注意】

- ① 滅菌包装より丁寧に取り出し、破損等が生じていないことを確認してください。
- ② バルーンは滅菌蒸留水以外で膨張させないでください。
- ③ ファネル表示の注入量は推奨値です。
- ④ バルーンは鉗子等で把持しないでください。
- ⑤ 無理に引張ったり、切断、穴をあける等の追加加工はしないでください。
- ⑥ 本製品は単回使用製品です。再使用はしないでください。
- ⑦ 使用後は、廃棄物処理法に基づき適正に処理してください。
- ⑧ ご使用前には、必ず添付文書をお読みください。

Φcon. 製品の安全・安心マーク



【シリコン100%】  
医療用に適したシリコン100%の  
原料を使用した製品です。



【X線造影ライン】  
X線不透過の造影ラインが入っています。



【滅菌済】  
各製品には、材質に適した  
滅菌が施されています。



【医療機器クラス分類】  
管理医療機器  
(クラスII)

販売名：イレウスチューブⅢ  
一般的名称：腸管用チューブ  
クラス分類：管理医療機器  
医療機器認証番号：222ADBZX00106000  
特定保険医療材料請求名：イレウス・スプリント

※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



発売元

富士システムズ株式会社  
<http://www.fujisys.co.jp/>



富士システムズ  
公式 LINE



代理店

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14  
札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2  
仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1  
大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2  
東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14  
名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6  
大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町1-3-5  
広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10  
福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40

TEL (03) 5689-1901 FAX (03) 5689-1907  
TEL (011) 211-0751 FAX (011) 211-0783  
TEL (022) 748-4201 FAX (022) 748-4204  
TEL (048) 729-6480 FAX (048) 644-9004  
TEL (03) 5689-1901 FAX (03) 5689-1907  
TEL (052) 265-9221 FAX (052) 265-9225  
TEL (06) 6943-8404 FAX (06) 6943-1425  
TEL (082) 555-8091 FAX (082) 227-4255  
TEL (092) 262-6777 FAX (092) 262-6770




ファイコン 親水性イレウスチューブ セット

# イレウス チューブ


## PHYCON ILEUS SET

使い易さにこだわった新機能を満載して新登場。

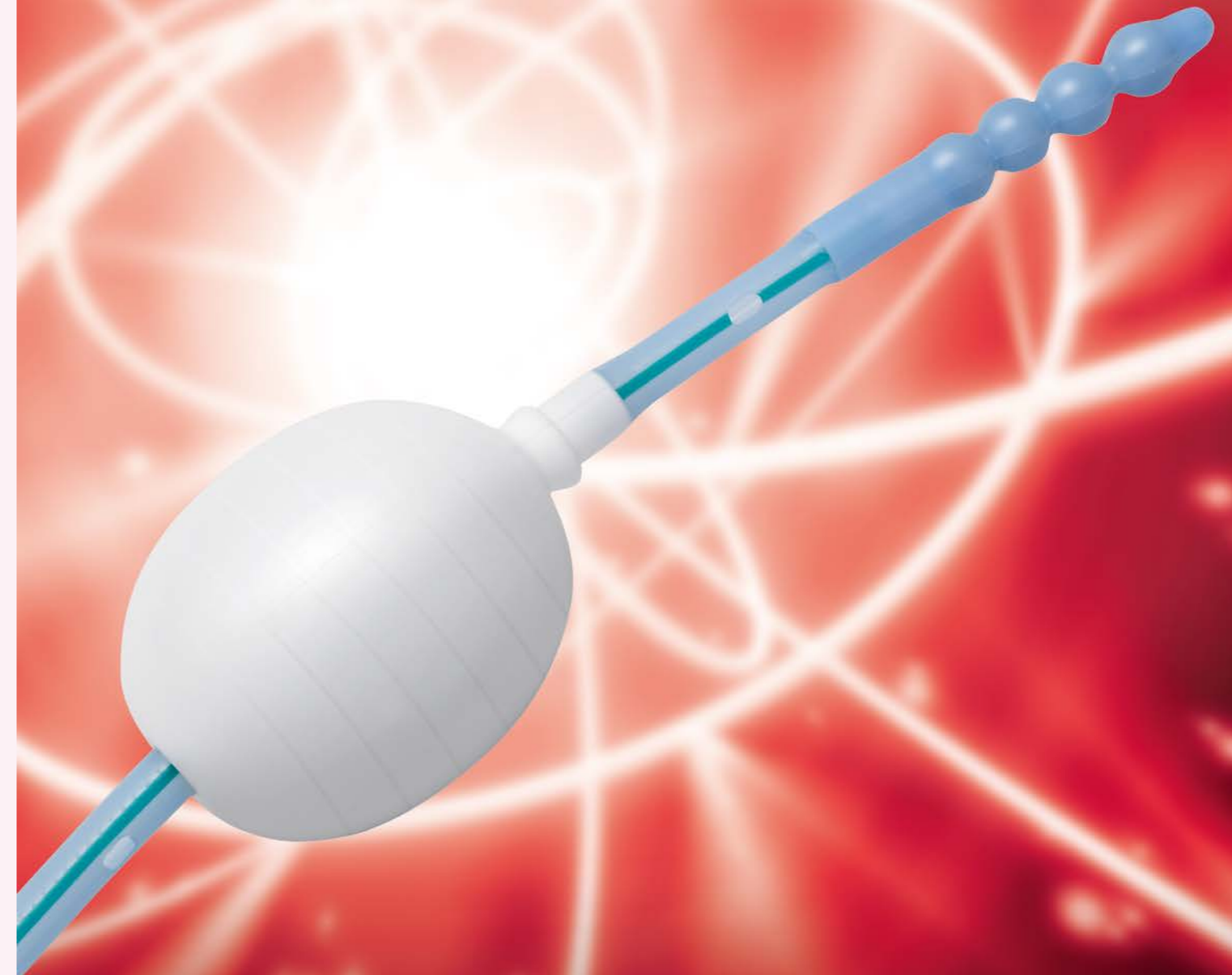


富士システムズ株式会社

# 次世代の 先進的ファイコン イレウスチューブが、 卓越した新機能を加えて新登場。

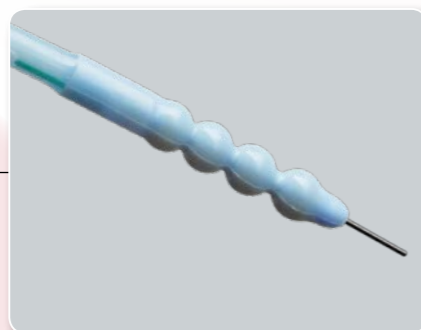

## [高い親水性がもたらす潤滑効果]

◀ イレウスチューブ全製品は、先端のボール部から2mの部分まで**親水性潤滑コーティング(本体表面)**が施されたシリコン製チューブです。優れた潤滑効果により、挿入時の滑りが一段と向上し、スムーズな操作が可能になります。

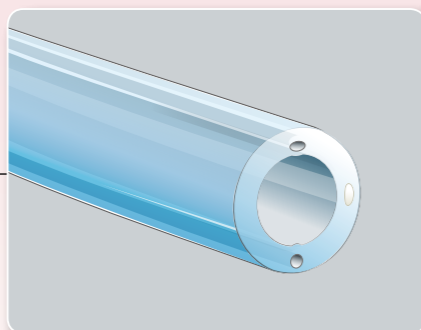

## [内腔の広いチューブ]

◀ **シリコン製チューブの内腔を広く**することでドレーン効率を向上させるとともに、患者さんの苦痛を緩和します。処置内容に合わせてソフト/ハードタイプの2種類から選択できます。




## [親水性ガイドワイヤ]

◀ イレウスチューブ全製品に**親水性ガイドワイヤ**がセットされました。ソフト/ハードタイプから処置内容に合わせて選択できます。  
(外径サイズ:0.052インチ)

高い弾力性を備えた先端部分の「スプリング効果」と**親水性潤滑コーティング(本体表面)**の「潤滑効果」によって、小腸屈曲部や腸管壁にやさしく滑らかに追従。スムーズな進入・通過を可能にします。

## イレウスチューブの優れた進入性

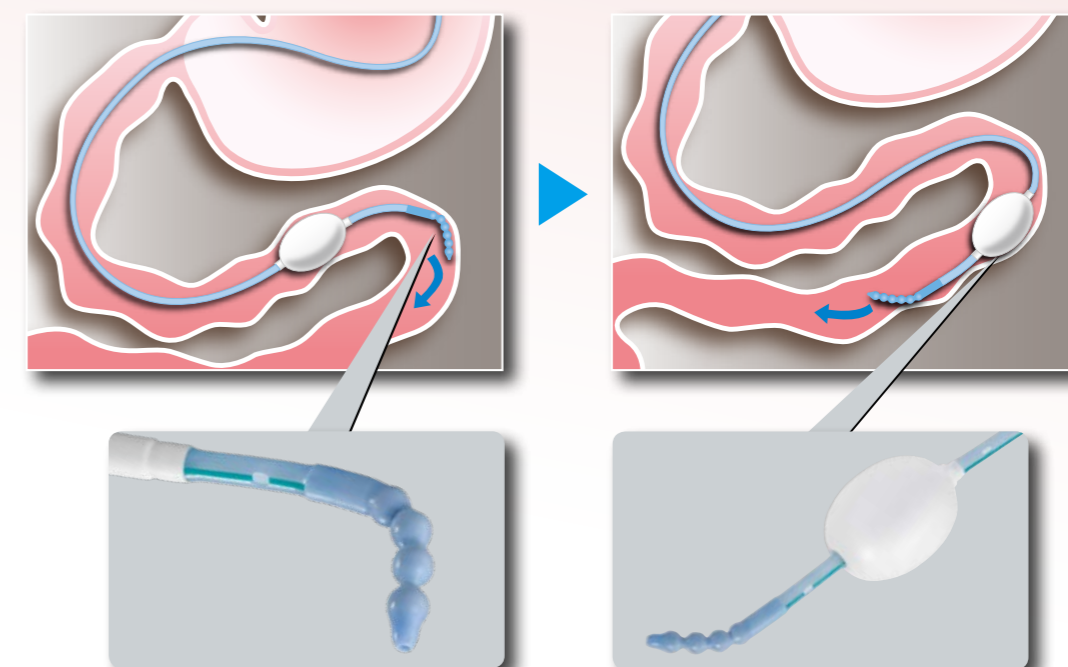

▲ 小腸屈曲部を先端ボール部分のスプリング効果と親水性コーティングの潤滑効果でやさしく滑らかに進入し通過します。

## [使いやすいファネル]

▶ **ファネル操作部をコンパクトに軽量化**した新設計です。先端部挿入処置の微妙な手元反応ができるよう操作性を高めました。



プレミアム製品 **ファイコン 親水性イレウスチューブ セット  
シングルバルーン**

スプリングによって弾力性がアップした先端部と親水性潤滑コーティング(本体表面)により、屈曲部へのスムーズな進入を実現した、高品質イレウスチューブです。



プレミアム製品 **ファイコン 親水性イレウスチューブ セット  
ダブルバルーン**

ダブルバルーンにより、選択的小腸造影が可能です。



■シングルバルーン型 (親水性チューブ本体 + 親水性ガイドワイヤ + Tコネクタセット)

製品番号	外径(mm)	先端	チューブ本体	親水性ガイドワイヤ				チューブ本体全長(mm)	包装単位
				ソフト	ハード	長さ(mm)	外径(インチ)		
0113634	4.7(14Fr)	開口	ソフト	●	—	3,500	0.052	3,000	1セット/箱
0113636	5.3(16Fr)			—	●	3,500	0.050		
0113638	6.0(18Fr)			—	●	3,500	0.050		
0113934	4.7(14Fr)			—	●	3,500	0.050		
0113936	5.3(16Fr)	開口	ハード	—	●	3,500	0.050	3,000	
0113938	6.0(18Fr)			—	●	3,500	0.050		
0114034	4.7(14Fr)	開口	ソフト	—	●	4,500	0.050	3,000	
0114036	5.3(16Fr)			—	●	4,500	0.050		
0114038	6.0(18Fr)			—	●	4,500	0.050		
5114034	4.7(14Fr)	開口	ハード	—	●	4,500	0.050	3,000	
5114036	5.3(16Fr)			—	●	4,500	0.050		
5114038	6.0(18Fr)			—	●	4,500	0.050		
0113514	4.7(14Fr)	閉鎖	ソフト	●	—	3,500	0.052	3,000	
0113516	5.3(16Fr)			●	—	3,500	0.052		
0113518	6.0(18Fr)			●	—	3,500	0.050		
5113514	4.7(14Fr)	閉鎖	ハード	—	●	3,500	0.050	3,000	
5113516	5.3(16Fr)			—	●	3,500	0.050		
5113518	6.0(18Fr)			—	●	3,500	0.050		

滅菌済 単回使用

■ファネル操作部  
シングルバルーン

ソフトチューブ



ハードチューブ



■ダブルバルーン型 (親水性チューブ本体 + 親水性ガイドワイヤ + Tコネクタセット)

製品番号	外径(mm)	先端	チューブ本体	親水性ガイドワイヤ				チューブ本体全長(mm)	包装単位
				ソフト	ハード	長さ(mm)	外径(インチ)		
5113976	5.3(16Fr)	開口	ハード	—	●	3,500	0.050	3,000	1セット/箱
5113978	6.0(18Fr)			—	●	3,500	0.050		
5114076	5.3(16Fr)	開口	ハード	—	●	4,500	0.050	3,000	
5114078	6.0(18Fr)			—	●	4,500	0.050		

滅菌済 単回使用


プレミアム製品

## ファイコン 親水性イレウスチューブ セット 先端可動型 バイラテラル/ユニラテラル

ファイコンの最先端技術から生まれた、可動バルーンにより先端部を左右方向に移動可能な、究極のバルーンコントロール機能を搭載しました。



バルーン操作可能な先端部が、スムーズな進入を実現します。

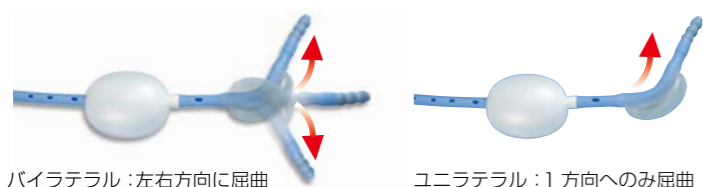

◀イレウス処置において、困難だった幽門輪通過や屈曲部のチューブ挿入が容易に行えます。バイラテラルは2つのバルーンをコントロールしながら先端部を左右方向へ屈曲させます。ユニラテラルはバルーンが1つなので、シンプルなバルーン操作でスムーズな進入をサポートします。処置時間の短縮につながり、患者さんの身体的ストレスも軽減できます。


#### ■先端可動型 (親水性チューブ本体 + 親水性ガイドワイヤ + Tコネクタセット)

製品番号	外径(mm)	先端可動タイプ	先端	チューブ本体	親水性ガイドワイヤ				チューブ本体全長(mm)	包装単位
					ソフト	ハード	長さ(mm)	外径(インチ)		
0113616	5.3(16Fr)	バイラテラル	開口	ハード	—	●	3,500	0.050	3,000	1セット/箱
0113618	6.0(18Fr)				—	●				
0114016	5.3(16Fr)	バイラテラル	開口	ハード	—	●	4,500	0.050	3,000	
0114018	6.0(18Fr)				—	●				
0114026	5.3(16Fr)	ユニラテラル	開口	ハード	—	●	4,500	0.050	3,000	
0114028	6.0(18Fr)				—	●				

滅菌済 単回使用

#### ■先端可動型 外観図

・バイラテラル

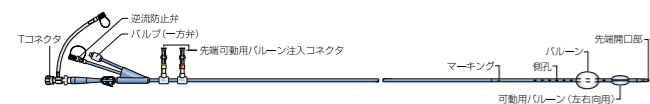


・ユニラテラル



プレミアム製品

## ファイコン 親水性イレウスチューブ セット 内視鏡誘導型

イレウス専門医のアイデアから生まれた、4ヶ所のウイングが内視鏡処置のスムーズな挿入を可能にします。

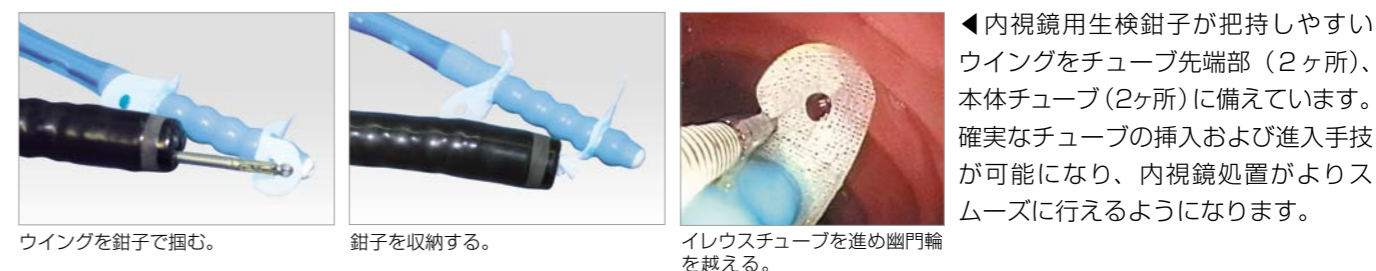

◀内視鏡用生検鉗子が把持しやすいウイングをチューブ先端部(2ヶ所)、本体チューブ(2ヶ所)に備えています。確実なチューブの挿入および進入手技が可能になり、内視鏡処置がよりスムーズに行えるようになります。

#### ■内視鏡誘導型 (親水性チューブ本体 + 親水性ガイドワイヤ + Tコネクタセット)

製品番号	外径(mm)	ウイング	先端	チューブ本体	親水性ガイドワイヤ				チューブ本体全長(mm)	包装単位
					ソフト	ハード	長さ(mm)	外径(インチ)		
5113924	4.7(14Fr)	4個	開口	ハード	—	●	3,500	0.050	3,000	1セット/箱
5113926	5.3(16Fr)				—	●				
5113928	6.0(18Fr)				—	●				

滅菌済 単回使用

#### ■内視鏡誘導型 外観図

