

器06 呼吸補助器
管理医療機器 経鼻用酸素供給カニューレ 35203000

ファイコン 酸素カテーテル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
 - 1) 再使用禁止

- ・無気肺
- ・炭酸ガスナルコーシス
- ・鼻腔粘膜損傷や出血
- ・鼻翼のびらんや潰瘍形成

【形状・構造及び原理等】

本品は、シリコンゴム製の酸素投与用カテーテルである。



外観図

〈材質〉

各部名称	原 材 料
カテーテル	シリコンゴム
コネクタ	シリコンゴム

本品はラテックスフリーである。

【使用目的又は効果】

鼻腔より挿管し、酸素導入に使用する。

【使用方法等】

1. 操作方法

本品はディスポーザブル製品であり、一回限りの使用のみで再使用できない。
2. 一般的使用方法
 - 1) 滅菌包装より丁寧に取り出し、破損等が生じていないことを確認する。
 - 2) 経鼻的に口蓋垂の後方まで挿入する。
 - 3) 本品のコネクタに回路を接続する。
 - 4) 接続部に緩みがないことを確認した後、酸素を投与する。
3. 使用方法等に関連する使用上の注意
 - 1) 本品の挿管深度、酸素投与濃度及び投与量は、臨床上の判断により決定すること。
 - 2) 酸素投与中は、患者の呼吸状態、循環状態を常に確認すること。[酸素投与により、酸素中毒や炭酸ガスナルコーシス等の合併症を引き起こすことがある]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - * 1) 本品はMR Safeであり、一般的なMR検査による影響はない。
(自己認証による)
2. 不具合・有害事象

本品の使用に際し、以下のような有害事象が生じる可能性がある。

 - 1) 重大な有害事象
 - ・酸素中毒

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管すること。
2. 有効期間

使用期限は製品ラベルに記載。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 富士システムズ株式会社
TEL 03-5689-1927