

医04 整形用品
管理医療機器 非固着性創傷被覆・保護材 11325000

トレックスーC

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
 - 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリエステル製のガーゼにシリコン樹脂をコーティングした非固着性ガーゼであって、大きさの違いにより、以下の6種類の製品がある。

呼 称	サイズcm
No.1	5 × 7
No.2	10 × 7
No.3	20 × 7
No.4	20 × 14
No.5	20 × 28.5
No.7	28.5 × 36

〈材質〉

各部の名称	原材料
ガーゼ	ポリエチレンテレフタレート
コーティング	シリコン樹脂

本品はラテックスフリーである。

【使用目的又は効果】

創傷面の保護を目的に使用する。

【使用方法等】

1. 操作方法

本品はディスプレイ製品であり、一回限りの使用のみで再使用できない。
2. 一般的使用方法
 - 1) 創部にあったサイズを選び、無菌操作により滅菌包装より本品を取り出す。
 - 2) 必要に応じ、創傷に合わせた裁断を行う。
 - 3) 創部に直接貼付する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 本品には吸収性はないため、創傷よりの滲出液等は、本品の上に吸収性のガーゼ等を置いて処置すること。
- * 2) 本品はMR Safeであり、一般的なMR検査による影響はない。
(自己認証による)
2. 不具合・有害事象

本品の使用に際し、以下のような有害事象が生じる可能性がある。

 - 1) 重大な有害事象
 - ・ ガーゼ交換時の再生上皮損傷

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管すること。
2. 有効期間

使用期限は製品ラベルに記載。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 富士システムズ株式会社
TEL 03-5689-1927