

逆行性冠灌流用カテーテル

## レトロ-THカテーテル




- 心筋保護液の注入ラインは内腔が広く、安定した心筋保護液の灌流が行えます。
- カテーテル先端部に装着したシリコン製扁平バルーンが、冠静脈洞開口部に近傍する静脈枝の閉塞を防止します。
- 冠静脈洞の内圧測定用のPressureラインがあり、洞破裂の合併症を予防できるとともに、心筋保護液の灌流状態が容易に確認できます。
- ルアーロック付のスタイレットが装着されており、盲目的挿入の操作が容易に行えます。
- 深度目盛がついており、カテーテル挿入深度が確認できます。



### ■直視下挿入法

ルアーロック付スタイレットを抜去してからご使用ください。

- ①上・下大静脈の2本脱血により完全体外循環としておきます。
- ②右房に縦切開(約2cm)を加え、本製品を冠静脈洞開口部に挿入し、1.0~2.0mLの滅菌生理食塩水で、冠静脈洞を損傷しないように十分注意しながら、バルーンを膨らませて固定します。その際、バルーンが冠静脈洞入口真近にあること及び、バルーンがスリップしないことを確認します。
- ③バルーンを膨らませる際には、冠静脈洞を損傷しないように十分注意してください。なお、スリップする場合は、冠静脈洞口の周囲にタバコ縫合をかけたタニケットとし、バルーンを冠静脈洞内に止めます。
- ④PRESSUREラインにより、冠静脈洞の内圧をモニターしながら心筋保護液を注入します。

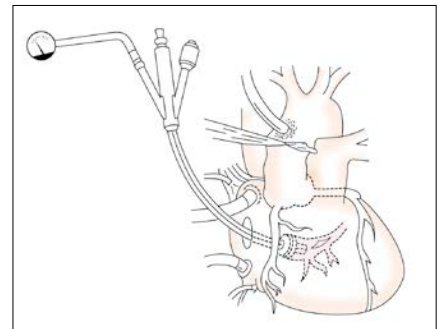

### ■外観図



製品番号	外径(mm)	バルーン容量(mL)	有効長(mm)	全長(mm)	包装単位
0180512	4.0(12Fr)	2.0	270	350	2本/箱
0180514	4.7(14Fr)				

滅菌済

### 先端部



販売名：レトロ-THカテーテル

医療機器承認番号：20400BZ00257000

特定保険医療材料請求名：心筋レトロ