

**2017年3月改訂（第5版）（新記載要領に基づく改訂）

*2015年11月改訂（第4版）

医 04 整形用品

一般医療機器 熱傷被覆・保護材 11322101

アルデルム ドレッシング

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

2. 本品は、使用目的以外に使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

1. アルミ蒸着した不織布の表層材と、水は弾き空気を通す裏面ポリエチレン系の不織布との間に、吸水性の高いポリエステル系の不織布を配した三層構造で出来ている。

2. 次の7種類のサイズがある。

10×10 cm
10×15 cm
20×20 cm
40×60 cm
60×80 cm
80×120 cm
73×220 cm

【使用目的又は効果】

火傷皮膚を被覆及び保護し、火傷部位の滲出液を吸収するためと、創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

本品を無菌適に滅菌袋より取り出し、そのまま直ぐに、1回限り使用する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品の使用中に創傷部に臨床的感染が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行って下さい。
- 2) 本品の使用中に濡れたり、汚れたりした場合には、直ちに新しいものと、取り替えて下さい。
- 3) 使用時に包装に汚損、破損、水濡れなどが見られた場合

には使用しないで下さい。

4) 本品は開封後直ちに使用して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

**1. 保管方法

高温多湿を避け、水濡れに注意し、清潔な場所に保管すること。

**2. 有効期間

**滅菌袋に記載{ 製造業者による }

*



:

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 栄和産業株式会社

住 所 東京都江東区深川1-1-5

電 話 TEL 03-6458-5071 (代)

製造業者名 ドイツ国 W.Sohngen GmbH (ゼーゲン社)