

器51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 気管支吸引用カテーテル 31249000

ファイコン サクションカテーテル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、シリコンゴム製の気管内吸引用カテーテルである。



外観図

〈材質〉

各部名称	原 材 料
カテーテル	シリコンゴム
コネクタ	シリコンゴム

本品はラテックスフリーである。

【使用目的又は効果】

気管内に挿管し、気管分泌物等の吸引に使用する。

【使用方法等】

1. 操作方法
本品はディスポーザブル製品であり、一回限りの使用のみで再使用できない。
2. 一般的使用方法
 - 1) 滅菌包装より丁寧に取り出し、破損等が生じていないことを確認する。
 - 2) 吸引調節口付コネクタ等を介して、本品を吸引装置に接続する。
 - 3) 吸引圧を掛けずに、気管内チューブ等の内腔より目的とする気管内まで挿入する。
 - 4) 吸引調節口を塞いで吸引する。
3. 使用方法等に関連する使用上の注意
 - 1) 本品に施されている目盛りマーキングで、挿管深度を決定しないこと。[目盛りマーキングは、挿管深度の単なる目安である]
 - 2) 本品に潤滑剤を塗布した後、気管内チューブ等の内腔より、目的とする気管内に挿管すること。
 - 3) 目的部位に達したら、吸引調節口を塞いで陰圧を掛け、本品を回しながら吸引すること。[本品の挿管深度、吸引圧及び吸引時間は、臨床上的判断により決定すること]
 - 4) 吸引は、患者の呼吸状態やチアノーゼの有無等を確認しながら行うこと。

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象
本品の使用に際し、以下のような有害事象が生じる可能性がある。
 - 1) 重大な有害事象
 - ・ 低酸素血症
 - ・ 気道粘膜の損傷や出血
 - ・ 不整脈
 - ・ 肺虚脱
 - ・ 気道感染

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、高温、多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管すること。
2. 有効期間
使用期限は製品ラベルに記載。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 富士システムズ株式会社
TEL 03-5689-1927