

SILVER GB TRACHEOSTOMY TUBE

■ [規格・仕様]

シルバー GB 気管切開チューブ (標準型)

| 製品番号 | 内径 mm | 外径 mm | 包装単位 |
|---------|-------|-------------|--------------|
| 0205124 | 5.5 | 8.0 (24Fr) | 1本/袋 5本/箱 |
| 0205127 | 6.0 | 9.0 (27Fr) | |
| 0205129 | 6.5 | 9.7 (29Fr) | |
| 0205130 | 7.0 | 10.0 (30Fr) | |
| 0205132 | 7.5 | 10.7 (32Fr) | |
| 0205133 | 8.0 | 11.0 (33Fr) | |
| 0205135 | 8.5 | 11.7 (35Fr) | |
| 0205136 | 9.0 | 12.0 (36Fr) | |
| 0205139 | 9.5 | 13.0 (39Fr) | |
| 0205140 | 10.0 | 13.3 (40Fr) | |

附属品：綿テープ 滅菌済 単回使用

シルバー GB II 気管切開チューブ (吸引型)

| 製品番号 | 内径 mm | 外径 mm | 包装単位 |
|---------|-------|-------------|--------------|
| 0205224 | 5.5 | 8.0 (24Fr) | 1本/袋 5本/箱 |
| 0205227 | 6.0 | 9.0 (27Fr) | |
| 0205229 | 6.5 | 9.7 (29Fr) | |
| 0205230 | 7.0 | 10.0 (30Fr) | |
| 0205232 | 7.5 | 10.7 (32Fr) | |
| 0205233 | 8.0 | 11.0 (33Fr) | |
| 0205235 | 8.5 | 11.7 (35Fr) | |
| 0205236 | 9.0 | 12.0 (36Fr) | |
| 0205239 | 9.5 | 13.0 (39Fr) | |
| 0205240 | 10.0 | 13.3 (40Fr) | |

附属品：綿テープ 滅菌済 単回使用

シルバー気管切開チューブ (カフなし型)

| 製品番号 | 内径 mm | 外径 mm | 包装単位 |
|---------|-------|-------------|--------------|
| 0205024 | 5.5 | 8.0 (24Fr) | 1本/袋 5本/箱 |
| 0205027 | 6.0 | 9.0 (27Fr) | |
| 0205029 | 6.5 | 9.7 (29Fr) | |
| 0205030 | 7.0 | 10.0 (30Fr) | |
| 0205032 | 7.5 | 10.7 (32Fr) | |
| 0205033 | 8.0 | 11.0 (33Fr) | |
| 0205035 | 8.5 | 11.7 (35Fr) | |
| 0205036 | 9.0 | 12.0 (36Fr) | |
| 0205039 | 9.5 | 13.0 (39Fr) | |

附属品：綿テープ 滅菌済 単回使用

シルバー GB 気管切開チューブ (標準型) 内筒管付

| 製品番号 | 内径 mm (内筒管) | 内径 mm (気管切開チューブ) | 外径 mm (気管切開チューブ) | 公称長 mm | 包装単位 |
|---------|-------------|------------------|------------------|--------|--------------|
| 0204530 | 5.0 | 7.0 | 10.0 (30Fr) | 67.3 | 1本/袋 5本/箱 |
| 0204532 | 5.5 | 7.5 | 10.7 (32Fr) | 70.2 | |
| 0204533 | 6.0 | 8.0 | 11.0 (33Fr) | 71.7 | |
| 0204535 | 6.5 | 8.5 | 11.7 (35Fr) | 76.6 | |
| 0204536 | 7.0 | 9.0 | 12.0 (36Fr) | 79.2 | |
| 0204539 | 7.5 | 9.5 | 13.0 (39Fr) | 86.3 | |
| 0204540 | 8.0 | 10.0 | 13.3 (40Fr) | 97.1 | |

附属品：綿テープ・内筒管 滅菌済 単回使用

シルバー GB II 気管切開チューブ (吸引型) 内筒管付

| 製品番号 | 内径 mm (内筒管) | 内径 mm (気管切開チューブ) | 外径 mm (気管切開チューブ) | 公称長 mm | 包装単位 |
|---------|-------------|------------------|------------------|--------|--------------|
| 0204630 | 5.0 | 7.0 | 10.0 (30Fr) | 67.3 | 1本/袋 5本/箱 |
| 0204632 | 5.5 | 7.5 | 10.7 (32Fr) | 70.2 | |
| 0204633 | 6.0 | 8.0 | 11.0 (33Fr) | 71.7 | |
| 0204635 | 6.5 | 8.5 | 11.7 (35Fr) | 76.6 | |
| 0204636 | 7.0 | 9.0 | 12.0 (36Fr) | 79.2 | |
| 0204639 | 7.5 | 9.5 | 13.0 (39Fr) | 86.3 | |
| 0204640 | 8.0 | 10.0 | 13.3 (40Fr) | 97.1 | |

附属品：綿テープ・内筒管 滅菌済 単回使用

シルバー気管切開チューブ (カフなし型) 内筒管付

| 製品番号 | 内径 mm (内筒管) | 内径 mm (気管切開チューブ) | 外径 mm (気管切開チューブ) | 公称長 mm | 包装単位 |
|---------|-------------|------------------|------------------|--------|--------------|
| 0204430 | 5.0 | 7.0 | 10.0 (30Fr) | 67.3 | 1本/袋 5本/箱 |
| 0204432 | 5.5 | 7.5 | 10.7 (32Fr) | 70.2 | |
| 0204433 | 6.0 | 8.0 | 11.0 (33Fr) | 71.7 | |
| 0204435 | 6.5 | 8.5 | 11.7 (35Fr) | 76.6 | |
| 0204436 | 7.0 | 9.0 | 12.0 (36Fr) | 79.2 | |
| 0204439 | 7.5 | 9.5 | 13.0 (39Fr) | 86.3 | |

附属品：綿テープ・内筒管 滅菌済 単回使用

内筒管 (単品)

| 製品番号 | 内径 mm | 外径 mm | 公称長 mm | 包装単位 |
|---------|-------|--------------|--------|--------------|
| 0204830 | 5.0 | 6.2 (30Fr 用) | 67.3 | 1本/袋 5本/箱 |
| 0204832 | 5.5 | 6.7 (32Fr 用) | 70.2 | |
| 0204833 | 6.0 | 7.2 (33Fr 用) | 71.7 | |
| 0204835 | 6.5 | 7.7 (35Fr 用) | 76.6 | |
| 0204836 | 7.0 | 8.2 (36Fr 用) | 79.2 | |
| 0204839 | 7.5 | 8.7 (39Fr 用) | 86.3 | |
| 0204840 | 8.0 | 9.2 (40Fr 用) | 97.1 | |

滅菌済 単回使用

販売名：シルバー気管切開チューブ
 一般的名称：単回使用気管切開チューブ
 クラス分類：管理医療機器
 医療機器承認番号：22600BZX00367000
 特定保険医療材料請求名：気管切開・吸引なし・一重管/二重管
 気管切開・吸引あり・一重管/二重管
 気管切開・カフなし

※使用上の注意に関しては、右記 QR コードより電子添文にてご確認ください。
 ※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



発売元

富士システムズ株式会社
<http://www.fujisys.co.jp/>



代理店

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
 札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2
 仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1
 大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2
 東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
 名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6
 大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町1-3-5
 広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10
 福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40

TEL (03) 5689-1901 FAX (03) 5689-1907
 TEL (011) 211-0751 FAX (011) 211-0783
 TEL (022) 748-4201 FAX (022) 748-4204
 TEL (048) 729-6480 FAX (048) 644-9004
 TEL (03) 5689-1901 FAX (03) 5689-1907
 TEL (052) 265-9221 FAX (052) 265-9225
 TEL (06) 6943-8404 FAX (06) 6943-1425
 TEL (082) 555-8091 FAX (082) 227-4255
 TEL (092) 262-6777 FAX (092) 262-6770



抗菌剤添加気管切開チューブ

シルバーGB気管切開チューブ



SILVER GB TRACHEOSTOMY TUBE



[Silver 抗菌剤添加]

気管切開部を清潔な状態に保つため、チューブ本体とサクシオンチューブにはシルバー（銀系抗菌剤）を添加したシリコンゴムを採用。（パイロットバルーンは除く）またスリップジョイントにも抗菌剤が添加されています。




[GB 抗菌剤添加カフ]

柔らかいシリコン製GB 抗菌剤添加カフは、気管壁に加わる壁圧を抑制し粘膜損傷などを軽減します。カフ内圧が安定するガスバリア性ソフトシリコンカフにより、圧変化を最小限に抑えます。

GBカフ内圧経時試験データ

注入圧：34cmH₂O (25mmHg)
試験環境：37℃、80%RH

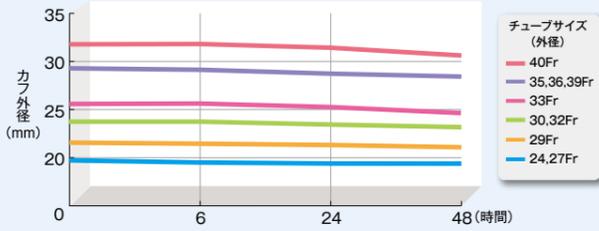

| サイズ (Fr) | 24.27 | 29 | 30.32 | 33 | 35.36.39 | 40 |
|----------------------|-------|------|-------|------|----------|------|
| 25mmHg (3.33kPa) 注入時 | 19.6 | 21.6 | 23.7 | 25.5 | 28.6 | 31.8 |
| 6時間後 | 19.5 | 21.4 | 23.7 | 25.5 | 28.1 | 31.8 |
| 24時間後 | 19.1 | 21.3 | 23.3 | 25.1 | 27.6 | 31.4 |
| 48時間後 | 18.9 | 21.0 | 23.1 | 24.8 | 27.1 | 30.6 |

カフ外径 mm (注：平均値)



Silver (抗菌剤添加)

+ GB (カフ)

+ Design (形状)



内筒管

標準型・吸引型・カフなし型のすべての製品は内筒管 有/無 2タイプの選択ができます。また、内筒管単品での取り扱いも行っております。

内筒管挿入イメージ




シルバー GB II 気管切開チューブ (吸引型)

シルバー GB 気管切開チューブ (標準型)

シルバー 気管切開チューブ (カフなし型)

チューブサイズ

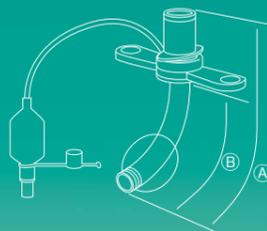

| 内径 mm | 外径 mm | ① 全長 mm | ② 公称長 mm |
|-------|-------------|---------|----------|
| 5.5 | 8.0 (24Fr) | 89 | 60.9 |
| 6.0 | 9.0 (27Fr) | 94 | 65.9 |
| 6.5 | 9.7 (29Fr) | 95 | 66.7 |
| 7.0 | 10.0 (30Fr) | 95 | 67.3 |
| 7.5 | 10.7 (32Fr) | 97 | 70.2 |
| 8.0 | 11.0 (33Fr) | 100 | 71.7 |
| 8.5 | 11.7 (35Fr) | 104 | 76.6 |
| 9.0 | 12.0 (36Fr) | 108 | 79.2 |
| 9.5 | 13.0 (39Fr) | 115 | 86.3 |
| 10.0 | 13.3 (40Fr) | 123 | 97.1 |

注入量 (mL) とカフ膨張外径 (mm) 平均値

| 20mmHg (2.66kPa) | | 25mmHg (3.33kPa) | |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 注入量 mL | 外径 mm | 注入量 mL | 外径 mm |
| 4.9 | 19.4 | 5.2 | 19.5 |
| 4.9 | 19.5 | 5.3 | 19.7 |
| 7.3 | 21.6 | 7.5 | 21.7 |
| 8.4 | 23.3 | 8.8 | 23.8 |
| 7.3 | 24.0 | 7.8 | 24.2 |
| 9.5 | 25.5 | 10.0 | 25.8 |
| 10.8 | 28.7 | 10.8 | 29.0 |
| 10.8 | 28.9 | 11.3 | 29.3 |
| 10.0 | 29.1 | 11.0 | 29.4 |
| 15.5 | 31.6 | 16.5 | 32.1 |

[共通規格仕様]

- 材質：医用シリコンゴム製 銀系抗菌剤添加
- コネクタサイズ：15mm φ
- カフ：抗菌剤添加シリコン製 GB カフ
- スリップジョイントコネクタ：抗菌剤添加樹脂製
- 造影確認：カフ部 X 線造影ライン（標準型・吸引型）
- 吸引口：カフ上部 1ヶ所（吸引型）
- 付属品：綿テープ 1 本

SILVER GB TRACHEOSTOMY TUBE