

器51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 保護栓 70280000

ファイコン カテーテルプラグ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
 - 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 本品の先端側は、テーパ形状になっている。

先端側 後端側

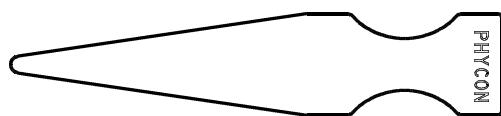

〈材質〉

各部の名称	原材料
本体	ポリプロピレン

本品はラテックスフリーである。

【使用目的又は効果】

本品は、カテーテル等の排液用ファネルに接続し、内容物の漏れを防止するために使用するプラグである。

【使用方法等】

1. 操作方法

本品はディスプレイ製品であるので、一回限りの使用のみで再使用できない。
2. 一般的使用方法
 - 1) 滅菌包装より丁寧に取り出し、外観上の異常がないことを確認する。
 - 2) 本品の先端側をカテーテル等の排液用ファネルに挿入する。
 - 3) 接続部からの液漏れ等がないことを確認する。
3. 使用方法等に関連する使用上の注意
 - 1) カテーテルを排液用バッグ等と接続するときは、本品を排液用ファネルから抜去すること。[本品をカテーテルに接続した状態では、排液用バッグ等に排液されない]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 挿入後は、本品とカテーテル等の接続部が確実に接続されていることを確認すること。
 - 2) 使用中は、本品の破損や接続部の緩み、液漏れ等がないことを定期的に確認すること。
 - 3) 本品とカテーテル等の接続部に薬液が付着すると、接続部に緩みが生じる場合がある。
- * 4) 本品はMR Safeであり、一般的なMR検査による影響はない。
(自己認証による)

2. 不具合・有害事象

本品の使用に際し、以下のような不具合・有害事象が生じる可能性がある。

- 1) その他の不具合
 - ・ 接続不良
 - ・ 接続部の破損
 - ・ 接続部の亀裂
- 2) その他の有害事象
 - ・ 感染症

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管すること。
2. 有効期間

使用期限は製品ラベルに記載。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 富士システムズ株式会社
TEL 03-5689-1927