

器51 医療用尿管及び体液誘導管
管理医療機器 ネラトンカテーテル 10734000

ファイコンネラトンカテーテル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

- 2) 重大な有害事象
・ 出血
・ 尿道損傷

【形状・構造及び原理等】

本品は、シリコンゴム製のネラトンカテーテルである。



外観図

〈材質〉

| 各部の名称 | 原材料 |
|-------|--------|
| カテーテル | シリコンゴム |

本品はラテックスフリーである。

【使用目的又は効果】

一時的導尿や膀胱内への薬液、洗浄液の注入を目的として使用する。

【使用方法等】

1. 一般的使用方法
 - 1) 本品の使用前に滅菌処理を施す。滅菌方法は下記のとおりである。
〈高圧蒸気法(オートクレーブ)〉
・ 滅菌条件: 121°C/30分
 - 2) 尿道口及び尿道口周辺部を消毒綿等で消毒する。
 - 3) 外尿道口より膀胱内に慎重に挿入する。
 - 4) 膀胱内への薬液や洗浄液の注入を行う場合は、薬液等の入ったシリンジを、本品の末端に緩みのないようしっかりと接続し、操作を行う
 - 5) カテーテルを慎重に引き抜く。
2. 使用方法等に関連する使用上の注意
 - 1) 滅菌の方法に適した包材を使用すること。[本品の被包は滅菌用の包材ではない]
 - 2) 刃物、鉗子、針等による傷には十分注意すること。[シリコンゴム製品は、傷が生じることにより強度が著しく低下するため、傷が生じると、カテーテル破損の原因となる]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 薬液による滅菌は行わないこと。
2. 不具合・有害事象
本品の使用に際し、以下のような不具合・有害事象が生じる可能性がある。
 - 1) その他の不具合
・ 結石等によるカテーテルの閉塞

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、高温、多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管すること。
2. 有効期間
 - * 1) 開封前の使用期限
使用期限は、製品ラベルに記載。[自己認証(当社データ)による]
 - 2) 開封後の使用期限
できるだけ速やかに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 富士システムズ株式会社
TEL 03-5689-1927