

器51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 精液注入用子宮カテーテル 34077000

ファイコンA I カテーテル


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 本品は、人工授精法（子宮腔内精子注入法）に用いるカテーテルである。
2. チューブは、9.8N(1.0kgf)の引張り強度を有している。

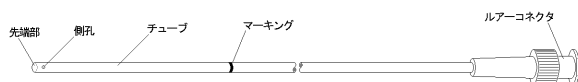

カテーテル外観図

〈材質〉

各部の名称	原材料
先端部	シリコンゴム
チューブ	
ルアーコネクタ	ホリスルフォン

本品はラテックスフリーである。

【使用目的又は効果】

人工授精を目的として、子宮腔内に処理された精液（濃縮精子）を直接注入する。

【使用方法等】

1. 操作方法
本品はディスポーザブル製品である。一回限りの使用のみで再使用しないこと。
2. 一般的使用方法
 - 1) 外陰部及び膣内を滅菌生理食塩水で洗浄清拭する。
 - 2) カテーテルのルアーコネクタにシリンジを装着し、先端部の側孔から精液（濃縮精子）を吸引する。
 - 3) カテーテル先端を、経頸管的に子宮腔内に挿入する。
 - 4) カテーテル先端位置を調節後、子宮腔内に精液（濃縮精子）を静かに注入する。
 - 5) カテーテルをゆっくり抜去する。
3. 使用方法等に関連する使用上の注意
 - 1) 目盛りマーキングで、挿入深度を決定しないこと。[目盛りマーキングは、挿入深度の単なる目安である]

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象
本品の使用に際し、以下のような有害事象が生じる可能性がある。
 - 1) 重大な有害事象
 - ・ 出血
 - ・ 子宮内膜損傷

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、高温、多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管すること。
2. 有効期間
使用期限は製品ラベルに記載。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 富士システムズ株式会社
TEL 03-5689-1927